




Mode d'emploi :

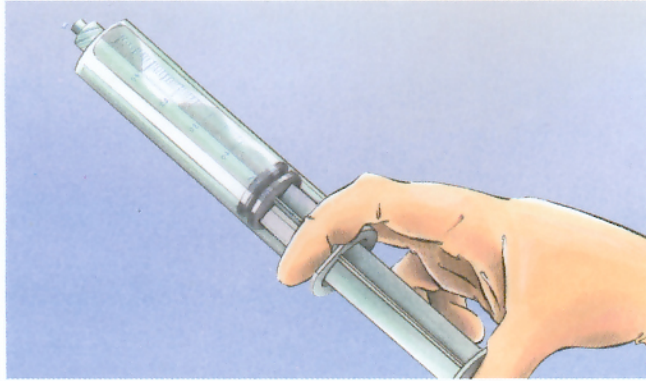


1 - Remplir une seringue de 60 ml avec la solution à perfuser. Enlever les bulles d'air de la seringue.

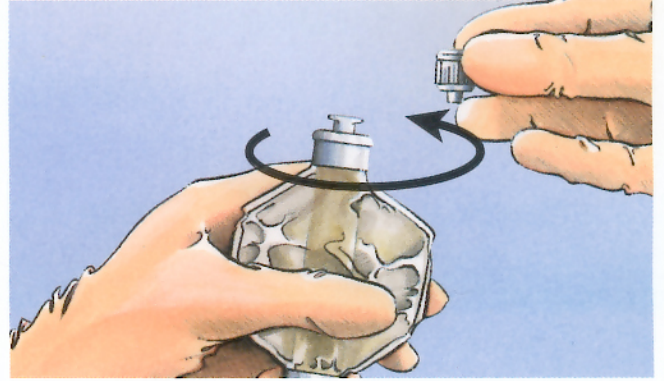


2 - Enlever le capuchon protecteur en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Garder ce capuchon sur une surface stérile.

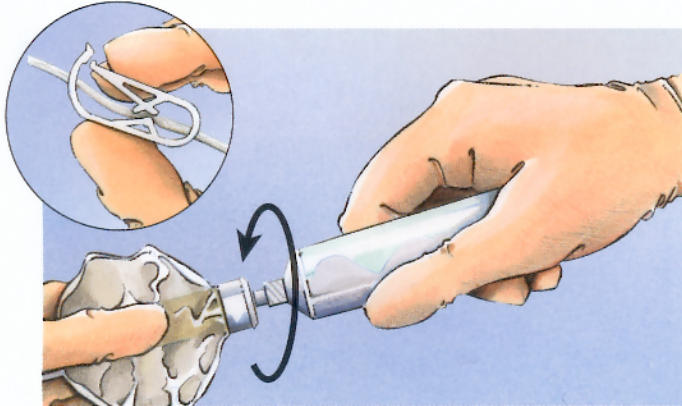


3 - Connecter la seringue à l'Easypump® - ne pas trop tourner - fermer le clamp de la ligne d'extension.

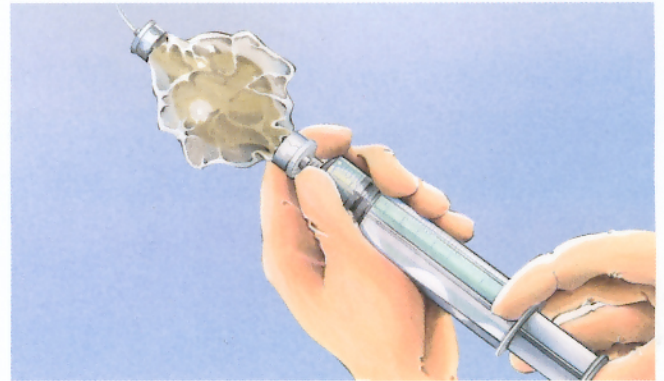


4 - Injecter le contenu de la seringue dans l'Easypump® - répéter jusqu'à ce que le volume désiré se trouve dans le réservoir.

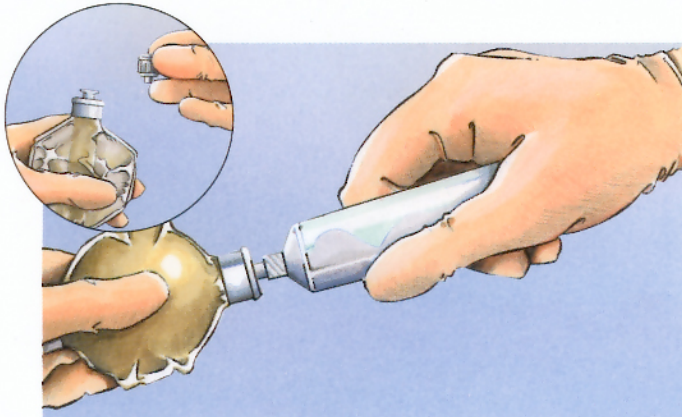


5 - Remettre le capuchon de protection lorsque le remplissage est terminé.

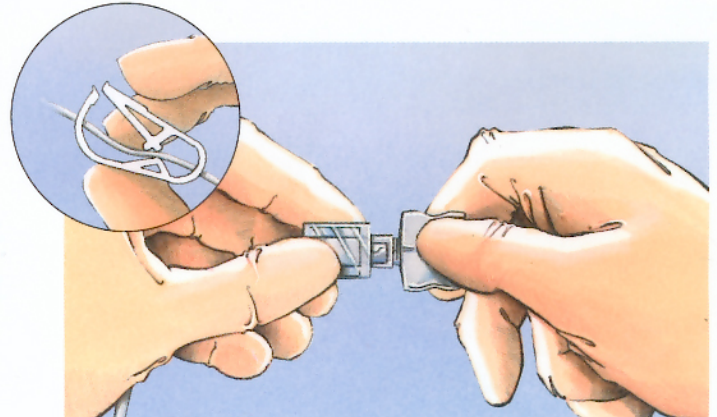

6 - Purger la ligne d'extension en ouvrant légèrement son capuchon et le clamp.

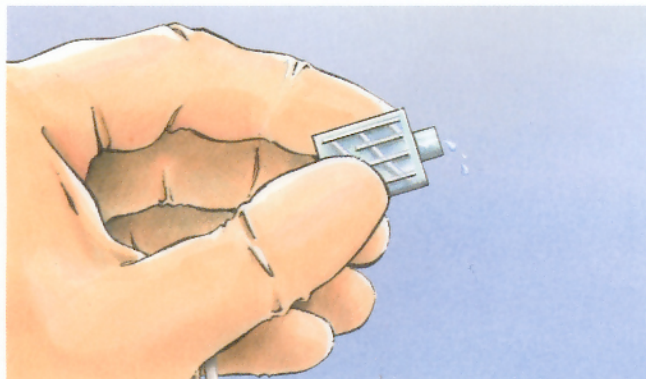

7 - Purger l'air de la ligne d'extension

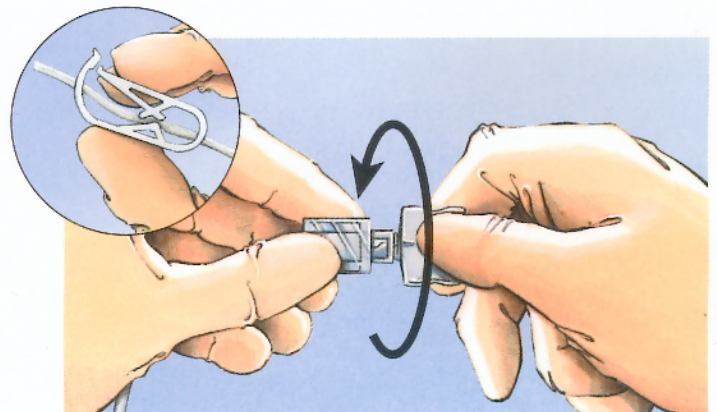

8 - Fermer le clamp et resserrer le capuchon de la ligne d'extension.

Le produit est prêt à être connecté sur l'accès vasculaire du patient. Mettre l'Easypump® rempli dans son sachet de protection si la connexion ne doit pas se faire immédiatement.